

NÁVOD K POUŽITÍ

ID Náramky

Identifikační náramky pro pacienty vinyl/PVC dvouvrstvé, s jednoráz. patentním uzávěrem
Objednací číslo: 253 400 , 253 402

Návod k použití

1. Identifikační náramky jsou dodávány v platech po více kusech.
2. Jednotlivé identifikační náramky oddělte odtržením, spoje jsou perforované. Při oddělení identifikačního náramku dbejte na zachování celistvosti náramku včetně jednorázového uzávěru.
3. U náramků s kapsou se píše identifikační údaje pacienta na papírovou kartičku a ta se vloží do kapsy. U popisovacích náramků se identifikační údaje píše na bílou rozšířenou plochu náramku. K tomuto účelu volte nejlépe permanentní netoxické popisovače. Upozornění: dezinfekce na alkoholové bázi mohou údaje částečně nebo úplně smazat! Po použití dezinfekčního prostředku tedy čitelnost a úplnost údajů vždy zkontrolujte.
4. Zvolte vhodné místo pro přiložení identifikačního náramku, např. zápěstí na ruce, kotník na noze (lze doporučit u dětí) s ohledem na níže uvedená doporučení, která je třeba se zvýšenou pozorností dodržovat. Nikdy nepřipevňujte náramek kolem krku pacienta.
5. Identifikační náramek přiložte tak, aby nezpůsoboval otok, zaškrcení končetiny či poškození kožní integrity. Pokud bude identifikační náramek utažen příliš těsně, může přímý kontakt při zabrání přístupu vzduchu či hybnosti vyvolat podráždění pokožky a to zejména u pacientů s citlivou pokožkou nebo u pacientů s kožními problémy nebo s horečkou.
6. Identifikační náramek uzavírejte tak, aby nebyl příliš volný a nehrozilo nebezpečí jeho sklouznutí. Přesto však zkontrolujte, že mezi náramkem a pokožkou je místo pro vložení dvou prstů vaší ruky.
7. Dbejte na to, aby identifikační náramek a kůže pod identifikačním náramkem po kontaktu s jinými látkami, jako např. s vodou, mastmi a léky, byly udržovány v čistotě a suchu.
8. Poučte pacienta, aby nekládal identifikační náramek do úst a přijměte taková opatření, aby byl tento požadavek uskutečnitelný. Zvláště u dětí a například smyslově omezených jedinců je pak vhodné zvážit alternativní umístění náramku na dolní končetinu. Při rozkousání náramku by totiž mohlo dojít ke spolknutí či vdechnutí jeho částí.
9. Dle metodiky MZČR kontrolujte identifikační náramek minimálně 1 x za 24 hodin. Při kontrole se zaměřte na správné přiložení identifikačního náramku – tj. volba vhodného místa, vznik otoku, škrcení, poruchy kožní integrity, celistvost náramku. Pokud je zjištěn takový nedostatek, je odpovědný zdravotnický personál povinen identifikační náramek neprodleně vyměnit a přiložit identifikační náramek nový a to způsobem, který pacienta nijak nepoškodí.
10. Doporučujeme rovněž poučit pacienta o významu identifikačního náramku, o jeho funkci jednoznačného propojení se zdravotnickou dokumentací a rovněž o tom, jak postupovat při jeho ztrátě, znehodnocení, či případné přecitlivělosti na některé složky.

Postupujte prosím dále podle Metodického doporučení MZČR MZDR 54595/2009
Počet kusů v balení: 500/300

Datum poslední revize: 3. 10. 2019