

Testy a indikátory

Nový test tepelné dezinfekce

Testy a indikátory – strojové mytí nástrojů

Test tepelné dezinfekce DES Control 5 min/90°C nebo 10 min/93°C



Nová technologie detekce dosažených parametrů podle EN ISO 15883

Indikátorová barva je umístěna pod laminací uvnitř kapsle

Barevná změna při dosažení požadovaných hodnot procesu je výrazná a vyhodnocení jednoduché

Balení obsahuje 200 kusů samolepicích testů

DES05 : 90°C / 5 min

DES10: 93°C / 10 min

1. Nepoužitý test je třeba uchovávat v originálním balení na chladném místě při teplotě do 4°C
2. Test vložte do síta k nástrojům, vyberte přitom nejchladnější místo mycího automatu
3. Po ukončení mycího cyklu zkontrolujte výsledek: správné dosažení parametrů se projeví změnou barvy indikačního bodu na tmavě hnědou až černou
4. Po expozici může být test po odlepení krycí fólie nalepen samolepicí stranou do dokumentace



**NOVÉ ŘEŠENÍ
KONTROLY
PARAMETRŮ
TERMICKÉ
DEZINFEKCE**

EN ISO 15883-2:2006

| Obj.č. | Název výrobku | Cena/ks | Cena bal. bez DPH | Cena bal. vč.DPH |
|-----------------|--|---------|----------------------|---------------------|
| 253 383 005 090 | Test tepelné dezinfekce DES Control 05 (200ks) | 12,6 | 2 520,00 | 3 049,20 |
| 253 383 010 093 | Test tepelné dezinfekce DES Control 10 (200ks) | 12,6 | 2 520,00 | 3 049,20 |