



NÁVOD K POUŽITÍ

Výrobek	DSS8515 Dezinfekční sterilizovatelná vana se sítím, víkem a odkapávačem DSS4215 Dezinfekční sterilizovatelná vana se sítím, víkem a odkapávačem
Výrobce	Warwick Sasco Ltd, Warwick House, Heathcote Way, Warwick, CV34 6TE Tel: 00 44 (0) 1926 422427 Fax: 00 44 (0) 1926 315405 E: info@sasco.co.uk
Účel použití	Dezinfekční sada pro dekontaminaci a manuální sterilizaci nástrojů a vybavení v tekutém prostředí Odolný materiál vhodný k čištění/dezinfekci chemikáliemi v nemocničních podmínkách. Dodává se nesterilní.
Omezení a reprocesing	DSS8515 a DSS4215 jsou vyrobeny z polypropylenu. Polypropylen je materiál vhodný pro sterilizaci parou, ETO, parami H ₂ O ₂ a zářením. Dekontaminujte a umývejte v přístrojích v souladu s normou ISO158883 a dodržujte přitom doporučení výrobce.
Návod	Před použitím očistěte
Příprava	Žádné zvláštní doporučení. Před použitím výrobek zkontrolujte, pokud je poškozen, přestaňte jej používat a informujte svého nadřízeného.
Čištění	Ruční čištění: oddělte jednotlivé části výrobku a jednotlivě je omyjte. Použijte schválené detergenty, enzymatické nebo biocidní prostředky. Opláchněte čistou vodou. Osušte utěrkami z netkaného materiálu. Nepoužívejte abrazivní prostředky. Používejte pouze prostředky, které jsou kompatibilní s polypropylenem. (Ověřte si doporučení výrobce)
Údržba, kontrola a ověření funkčnosti	Doporučuje se vizuálně kontrolovat výrobek a testovat, zda byla po použití odstraněna veškerá nečistota. Doporučuje se pravidelně výrobek kontrolovat, zda není nadměrně opotřeben nebo zda není na některých místech popraskaný.
Balení	Není vyloženě doporučeno.
Sterilizace / dekontaminace	Pro zachování dlouhodobé kvality výrobku se doporučuje sterilizace v nízkoteplotních typech sterilizačních procesů. Manuální sterilizace se doporučuje odpovídajícími dezinfekčními prostředky po předchozím umytí výrobku.
Skladování	Nepoužívané výrobky je třeba skladovat v původních obalech, v polyetylenovém sáčku. Dále se doporučuje používat i ochranný karton. Skladujte na suchém místě, neskladujte na podlaze. Minimální teplota skladu: 4st. C Použitelnost: 36 měsíců od data výroby Sterilizovaný výrobek skladujte podle zavedených pravidel na čistém a suchém místě v regálech.
Upozornění	Nepoužívejte žádné abrazivní pískové prostředky ani kovové kartáče, mohly by způsobit poškrábání.
Důležité informace výrobce	Tyto informace výrobce Warwick SASCo Ltd jsou doporučením pro nakládání se zdravotnickými prostředky. Zodpovědnost za zpracování a používání výrobku by měla být předána personálu, který byl dostatečně vyškolen. Jedině v takovém případě je možné dosáhnout potřebných výsledků. Je třeba zavést systém validace a monitoringu nakládání se zdravotnickými prostředky. Je třeba vždy postupovat podle doporučení výrobce a vždy zvažovat potenciální důsledky nepříznivých okolností.
Doplňující informace	The Warwick Range of Products conform to : ISO9001:2008, ISO13485:2003 EEC Directive 93/42 Other Referenced Standards: EN980:2008, BS EN ISO14971:2007