

**vistex**<sup>®</sup>

*Get it pure*


**VYHODNOCOVACÍ TABULKY**

2020




**Předsterilizační příprava**  
3.01.01 Ruční mytí, mytí podložních mís

Test mytí nástrojů proteinový Getinge, povrchy (25ks)  
200 503 878 500

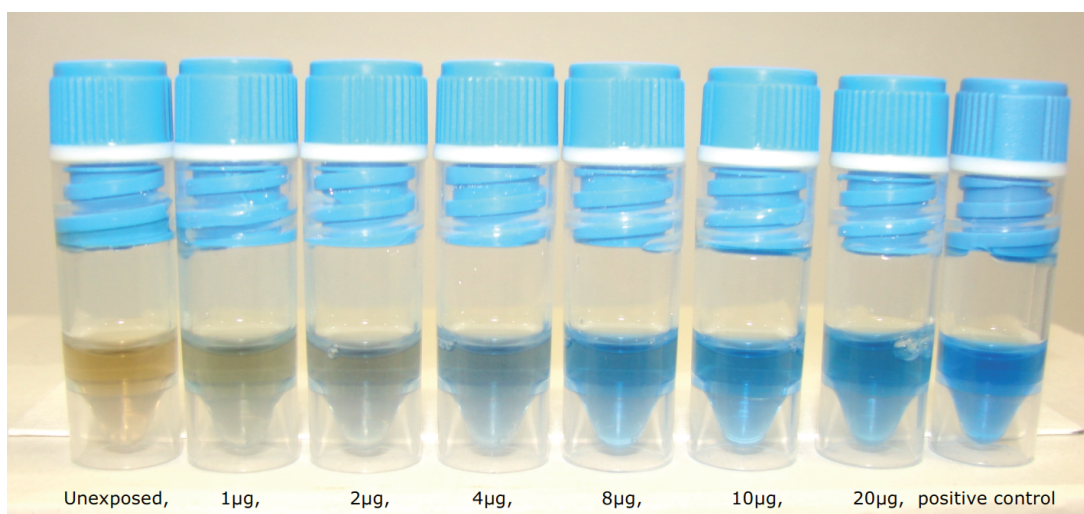

Test mytí nástrojů proteinový Pro-Check oboustranný (2x50ks)  
253 380 008 005

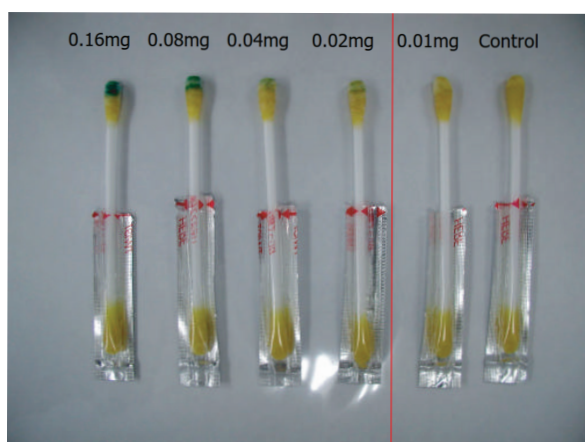

●	<b>Před použitím</b>
✓	<b>Správně</b>
✗	<b>Chybně</b>


### Předsterilizační příprava

#### 3.01.02 Ultrazvukové čištění

Test mytí nástrojů Chemdye UZV/kavitace (30ks)  
300 100 100 001



Test mytí nástrojů Getinge, UZV, kovový (50ks)  
200 503 865 200

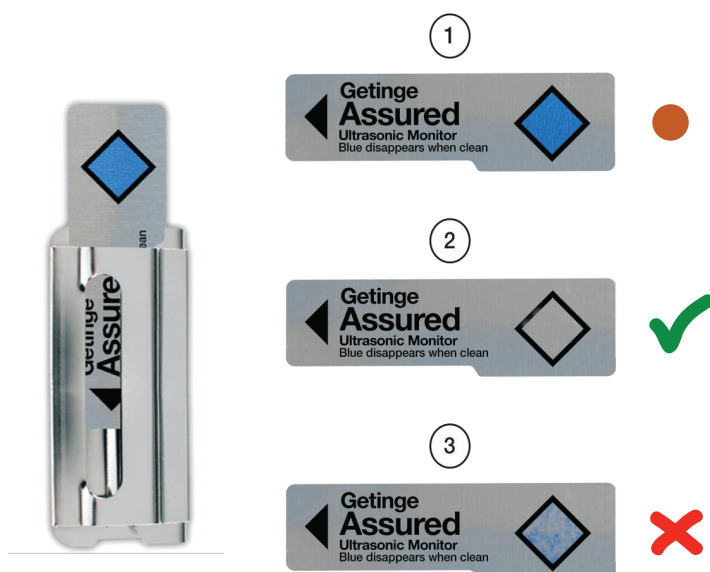

●	Před použitím
✓	Správně
✗	Chybně

**Předsterilizační příprava**  
3.01.03 Strojové mytí

Test mytí nástrojů dutinový Getinge,  
kovový (25ks) 200 503 864 900

Test mytí nástrojů Getinge,  
kovový (50ks) 200 503 864 600



●	Před použitím
✓	Správně
✗	Chybně

Test mytí nástrojů dutinový Lumenia 122,  
tělísko + testy (1+120ks) 300 100 200 001

Test mytí nástrojů Josafe CCI easy,  
4 štěrby, dle ISO 15883 (18ks) 253 380 050 052

**Unprocessed**

● Chemdye Lumenia [eye icon] [pink square] [QR code] [LOT icon] ●

**Failures**



● Chemdye Lumenia [eye icon] [pink square] [QR code] [LOT icon] ✗

● Chemdye Lumenia [eye icon] [pink square] [QR code] [LOT icon] ✗

- Inadequate chemical agents' concentration
- Insufficient water pressure.
- Poor water quality, temperature or cycle

**Processed and satisfactory**

● Chemdye Lumenia [eye icon] [white square] [QR code] [LOT icon] ✓

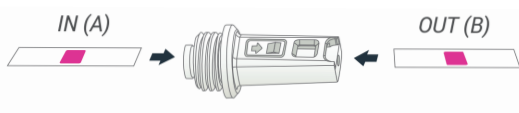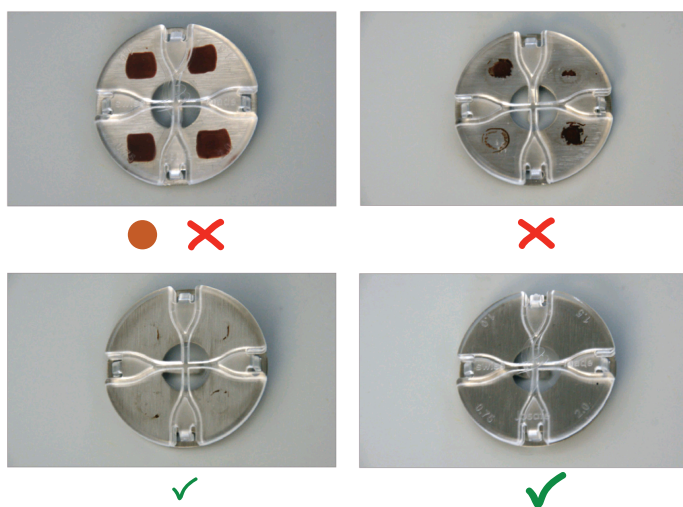

**Předsterilizační příprava**  
3.01.03 Strojové mytí



Test mytí nástrojů soil práškový Getinge, s kartáčkem (1ks) 200 504 228 300

Test mytí nástrojů STERIM, plast (100ks) 253 383 100 100



Test tepelné dezinfekce DesControl, 5 min/90°C samolep. (200ks) 253 383 005 090

Test tepelné dezinfekce DesControl, 10 min/93°C samolep. (200ks) 253 383 010 093

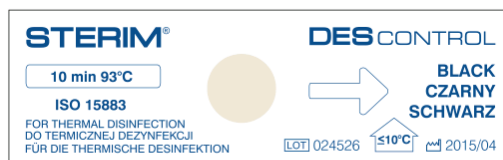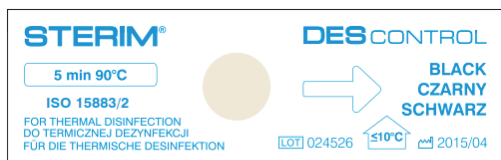

● Před použitím



Správně




Chybně


## Sterilizace

### 3.02.02.2 Nebiologické systémy – Typ 2 zvláštní zkoušky


Test sterilizace formal dutinový Getinge, typ 2,  
vč. tělíška (250ks) 200 504 053 100

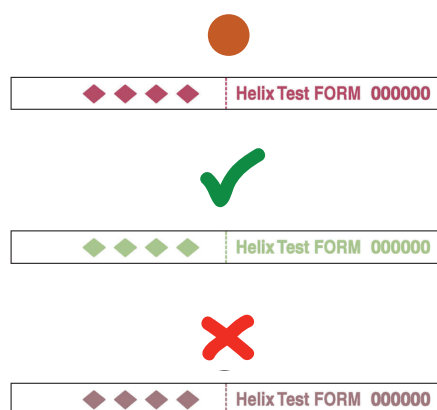

Test sterilizace H2O2 dutinový Sterintech,  
typ 2, vč. tělíška (100ks) 253 600 103 020

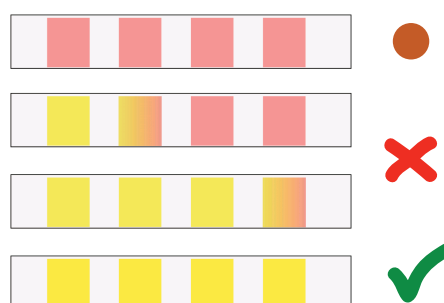


Test sterilizace pára BD Getinge, typ 2,  
balíček jednorázový (30ks) 200 600 115 490

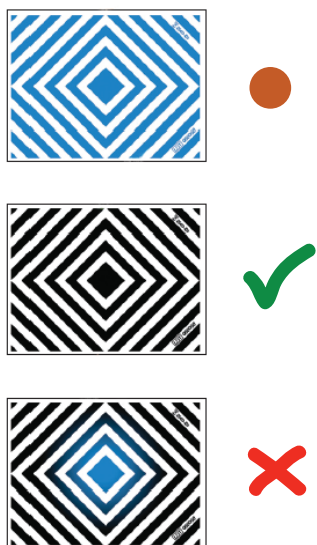

Test sterilizace pára BD Getinge, typ 2,  
karta (30ks) 200 504 052 400

Test sterilizace pára BD Getinge, typ 2, MINIBalíček  
jednorázový (30ks) 200 600 115 560



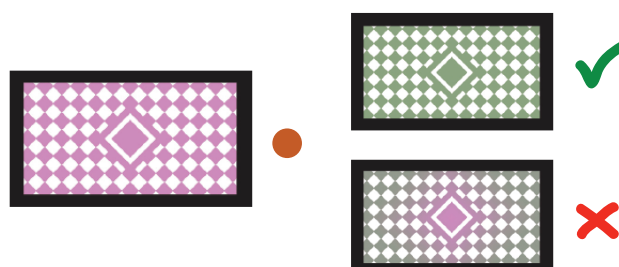


● Před použitím    ✓ Správně    ✗ Chybně

### Sterilizace



#### 3.02.02.2 Nebiologické systémy – Typ 2 zvláštní zkoušky

Test sterilizace pára BD Steritec, typ 2,  
arch A4 (100ks) 253 340 001 110

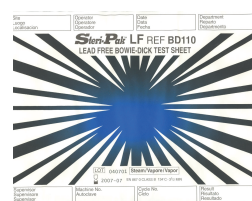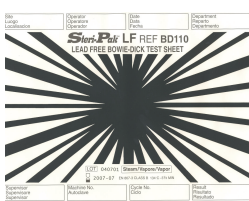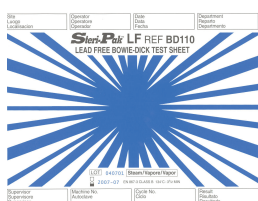

Test sterilizace pára dutinový Getinge, typ 2,  
3,5 min/134°C, vč. tělíska (250ks) 200 504 052 700

Test sterilizace pára dutinový Getinge, typ 2,  
7 min/134°C, vč. tělíska (250ks) 200 504 053 000

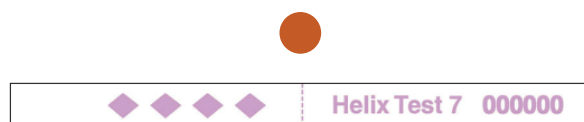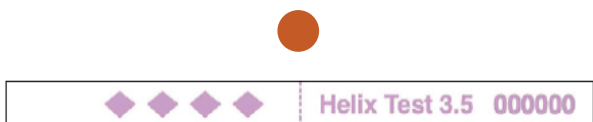

● Před použitím    ✓ Správně    ✗ Chybně



## Sterilizace


### 3.02.02.3 Nebiologické systémy – Typ 4 multiparametrové

Test sterilizace formal multiparam. Getinge, typ 4 (250ks) 200 504 051 900

Test sterilizace H2O2 multiparam. SPS, typ 4 (250ks) 253 364 004 250



Test sterilizace HV multiparam. Chemdye, trubičkový, typ 4 (100ks) 300 100 400 001

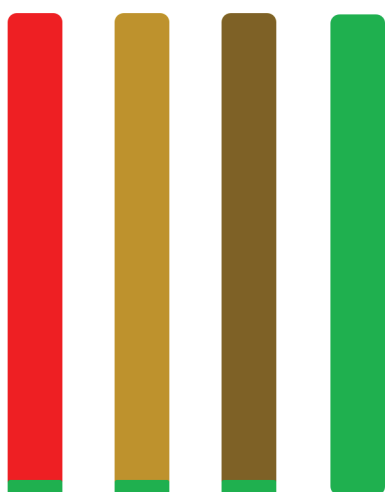

Před použitím



Správně







Chybně

## Sterilizace




### 3.02.02.3 Nebiologické systémy – Typ 4 multiparametrové

Test sterilizace HV multiparam. SPS, typ 4,  
proužkový (250ks) 253 364 001 250

Test sterilizace pára multiparam. Getinge, typ 4,  
121/134, laminovaný (250ks) 200 504 051 700

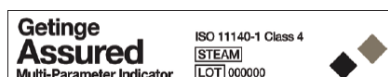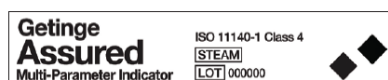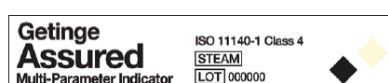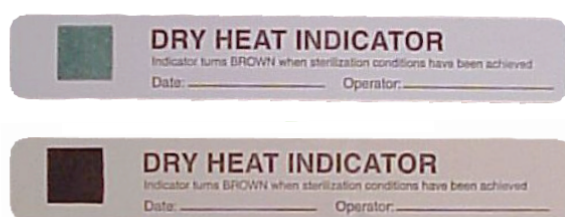

Test sterilizace pára multiparam. Getinge, typ 4,  
121/134 (2x250ks) 200 504 051 800

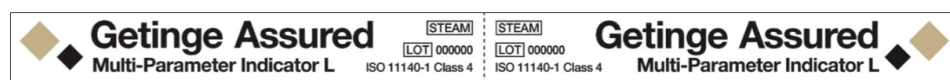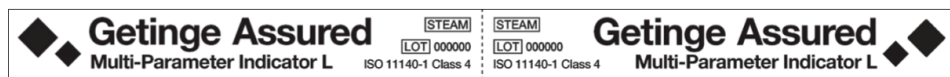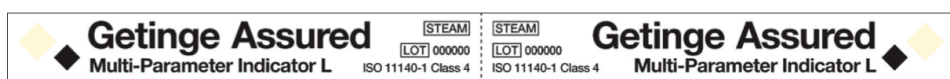

● Před použitím    ✓ Správně    ✗ Chybně

## Sterilizace

### 3.02.02.4 Nebiologické systémy – Typ 5 integrátory

Test sterilizace pára multiparam. SPS, typ 5, 121/134  
objektivní (100ks) 253 364 003 100





●	Před použitím
✓	Správně
✕	Chybně

### Sterilizace


#### 3.02.02.4 Nebiologické systémy – Typ 6 emulátory

Test sterilizace pára multiparam. Getinge, typ 6, 121/134, lam., samol. (250ks) 200 504 051 300

Test sterilizace pára multiparam. Getinge, typ 6, 121/134, laminovaný (250ks) 200 504 050 900

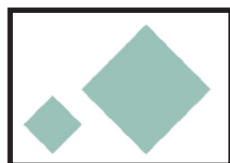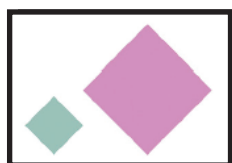

Test sterilizace pára multiparam. Integron, flash, typ 6, 4 min/134°C (200ks) 300 100 300 001

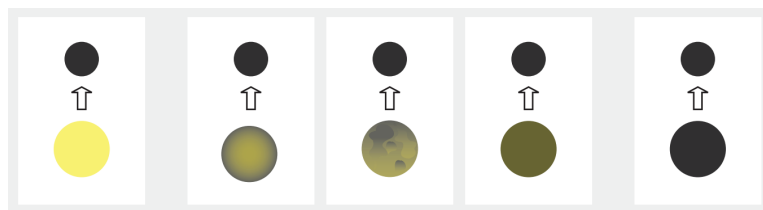

● Před použitím      ✓ Správně      ✗ Chybně



## Proč Vistex

1. **Dodávky „24“** – skladové zásoby v hodnotě téměř 7 mil. korun, automatický systém vyskladňování
2. **Odbornost** – aktivní členství v České společnosti pro sterilizaci, přednášky, odborné publikace, odborné konzultace
3. **Komplexnost** – unikátní rozsah sortimentu
4. **Novinky v oboru** – vše co usnadňuje práci, zvyšuje bezpečnost procesu sterilizace a poskytuje přesnější monitoring
5. **Flexibilita** – rychlá a spolehlivá řešení aktuálních potřeb
6. **Stabilita** – silná pozice na trhu, silné zázemí, konkurenceschopnost, silný pracovní tým
7. **Vstřícnost a ochota**